

NIO

Nuevo Dispositivo Intraóseo



nio
A D U L T



nio
PEDIATRICT

- ✓ Lista para usar
- ✓ Fácil manejo
- ✓ Aguja no expuesta
- ✓ Tamaño de bolsillo y ligera (100gr.)
- ✓ No requiere carga externa ni batería
- ✓ Acceso vascular en 10 segundos
- ✓ Desechable y de un solo uso
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ Dispositivos de seguridad
- ✓ 5 años de esterilidad

NIO ADULT - NIO PEDIATRIC


- NIO es ligera, pequeña, económica y muy fácil de usar
- Curva de aprendizaje de uso mínima
- Contaminaciones cruzadas en incidentes por múltiples víctimas no descritas. Completamente desechable
- Diseñada para usar en todos los puntos de inserción descritos clínicamente sin necesidad de cambiar de aguja.
- NIO es el único dispositivo intraóseo que cumple la normativa de buques PRE/2315/2015 (BOE 265 de 5/11/2015)




NIO

Nuevo Dispositivo Intraóseo

INSTRUCCIONES

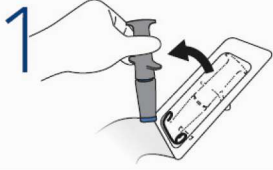


1 Abrir el paquete y retire el NIO.

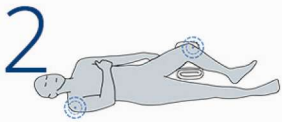


2 Localizar y desinfectar el lugar de la inyección.



3 Colocar el dispositivo aprox. 2cm medial y 1 cm proximal desde la tuberosidad tibial
sitio alternativo: la cabeza humeral.

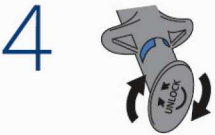


4 Desbloquear el NIO mediante la rotación de la tapa 90 grados en cualquier dirección.

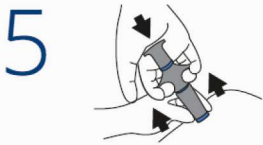

5 Coloque la mano dominante sobre la tapa y presione el dispositivo contra el paciente. Mientras presiona hacia abajo en el dispositivo con la palma, tire del disparador alas hacia arriba con los dedos.



6 Tire suavemente de la NIO arriba en un movimiento de rotación mientras sostiene el estabilizador de aguja contra el lugar de inserción.

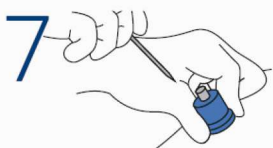

7 Continúe sosteniendo el estabilizador de aguja en su lugar y tire hacia arriba el estilete de eliminar.

